



**daytot**joey

BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Joey verwenden. Alle Anleitungen finden Sie auch auf unserer Website [www.daytotjourneys.com](http://www.daytotjourneys.com), zusammen mit Videos und FAQs.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Abschnitt 1:</b>	Verwendungszweck	02
<b>Abschnitt 2:</b>	Zertifizierung	02
<b>Abschnitt 3:</b>	Warnungen und Vorsichtshinweise	03
<b>Abschnitt 4:</b>	Garantiebedingungen	06
<b>Abschnitt 5:</b>	Sicherheitsinformationen	06
<b>Abschnitt 6:</b>	Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen	07
<b>Abschnitt 7:</b>	Reinigung und Pflege	08
<b>Abschnitt 8:</b>	Tägliche Überprüfung	09
<b>Abschnitt 9:</b>	Die Wiederausgabe von Daytot Produkten	10
<b>Abschnitt 10:</b>	Gebrauchsanweisung	11
	10.1 Das Auspacken und Zusammenbauen von Joey	11
	10.2 Das Anbringen des Stabilisators	12
	10.3 Das Einsetzen des Kissens	13
	10.4 Das Einstellen des Einsatzes – Nur für Größe 2	14
	10.5 Das Anbringen der Bezüge	16
	10.6 Das Anbringen des Lätzchens	18
	10.7 Vorbereitung und Einrichtung	19
	10.8 Die Verwendung von Joey	22
	10.9 Das Zerlegen von Joey	23
	10.10 Zubehör	23
<b>Abschnitt 11:</b>	Informations techniques	24
	11.1 Produktdimensionen	24
	11.2 Die Größenbestimmung des Benutzers	25
	11.3 Größentabelle	26
	11.4 Verwendete Materialien	26
<b>Abschnitt 12:</b>	Symboltabelle	27
<b>Abschnitt 13:</b>	Häufig gestellte Fragen	28

## ABSCHNITT 1: Verwendungszweck

### Verwendungszweck

Joey ist eine Frühinterventions-Krabbelvorrichtung für Säuglinge, bei denen das Risiko einer motorischen Verzögerung besteht.

Joey eignet sich zur Nutzung im häuslichen Bereich und sonstigem privaten Umfeld.

Joey ist für die ersten 6 Monate gedacht und fördert die motorischen Fähigkeiten des Säuglings, indem er in der Bauchlage zu eigenständigen Bewegungen angeregt wird. Joey unterstützt den Säugling und erlaubt ihm, sich unabhängig zu bewegen, während er die wichtigen Grundlagen für seine zukünftige körperliche und kognitive Entwicklung schafft.

### Indikationen

Joey wird als ein Produkt bezeichnet, das eine geringe Einschätzung benötigt und direkt an die Eltern abgegeben oder vom Therapeuten oder Arzt des Säuglings verschrieben wird. Zu den Benutzern gehören unter anderem Frühgeborene, nicht gehfähige Säuglinge mit einer neuromuskulären, angeborenen oder chromosomalen Störung oder einer globalen Entwicklungsverzögerung. Diese Erkrankungen beeinträchtigen typischerweise die Grobmotorik motorischen Fähigkeiten und die Körperhaltung.

Joey ist dafür vorgesehen, den Säugling in der Bauchlage zu stützen, so dass seine Hände und Füße frei beweglich sind.

In dieser Position kann der Säugling die Kopf- und Rumpfkontrolle, Schulterstabilität sowie die Gewichtsbelastung der oberen Gliedmaßen entwickeln.






Der Einsatz von Joey für therapeutische Zwecke würde wahrscheinlich mit einer kontinuierlichen Intervention verschiedener multidisziplinärer Teams einhergehen, um die körperlichen, kognitiven, sozialen und sensorischen Fähigkeiten des Säuglings zu fördern.

## ABSCHNITT 2: Zertifizierung





Joey ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß den Vorschriften der EU und des Vereinten Königreichs. Als Hersteller erklärt Daytot Ltd., dass dieses Produkt der Verordnung für Medizinprodukte (2017/745) und den Verordnungen für Medizinprodukte des Vereinigten Königreichs 2002 entspricht.

## ABSCHNITT 3: Warnungen und Vorsichtshinweise




### Das Auspacken

	Kunststoffverpackungen nicht in Reichweite von Säuglingen aufbewahren - es besteht Erstickungsgefahr. Bitte ordnungsgemäß lagern oder entsorgen.
	Kleinteile nicht in Reichweite von Säuglingen aufbewahren. Es besteht Erstickungsgefahr. Bitte ordnungsgemäß aufbewahren.
	Lesen Sie vor dem Zusammenbauen oder der Verwendung alle Informationen in der Bedienungsanleitung vollständig durch. Digitale Kopien aller Informationen zu diesem Produkt sind auf der Daytot Website verfügbar.
	Sollten Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise des Produkts haben, stellen Sie bitte die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Daytot Kundendienst unter hi@daytotjourneys.com.
	Wir empfehlen Ihnen, die Aktivitätsmatte 24 Stunden lang zu lüften und beide Seiten vor dem ersten Gebrauch mit warmem Seifenwasser zu abzuwaschen.







### Das Zusammenbauen






	Legen Sie das Lätzchen ordentlich auf den Bezug und achten Sie darauf, dass keine Falten im Kopfbereich entstehen. Es kann sonst zu einer Behinderung der Atemwege kommen.
	Vergewissern Sie sich, dass alle Teile gemäß Abschnitt 10 „Gebrauchsanweisung“ korrekt zusammengebaut sind.
	Vermeiden Sie das Einklemmen der Finger, wenn Sie abnehmbare Teile montieren und/oder demontieren. Achten Sie auf die Verbindungsstellen beim Weghalten von Teilen.
	Vergewissern Sie sich, dass der Bezug vor dem Gebrauch sicher am Gehäuse befestigt ist, wie in Abschnitt 10 „Gebrauchsanweisung“ beschrieben. Andernfalls kann der Säugling aus dem Produkt fallen.

### Einsatzbereit machen




	Das Produkt ist täglich zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass alle Komponenten gut befestigt sind und sicher verwendet werden können. Siehe Abschnitt 8 „Tägliche Inspektion“.
	Vergewissern Sie sich, dass der Säugling vor dem Gebrauch immer korrekt im Produkt positioniert und gestützt wird, wie in Abschnitt 10 „Gebrauchsanweisung“ beschrieben. Andernfalls könnte der Säugling aus dem Produkt fallen.
	Vergewissern Sie sich, dass der Gurt fest um den Säugling geschnallt ist, und achten Sie dabei auf die Klettverschlüsse. Andernfalls kann der Säugling aus dem Produkt fallen.

### Einsatz

	Das Produkt darf nur in Innenräumen auf einer flachen, festen und ebenen Oberfläche verwendet werden. Das Produkt sollte nicht auf hohen Flächen (z. B. Tischen) verwendet werden).
	Säuglinge sollten während der Verwendung des Produkts nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
	Achten Sie genau auf die Kopfhaltung des Säuglings. Vergewissern Sie sich, dass die Atemwege stets frei sind.
	Vergewissern Sie sich, dass das Produkt während der Benutzung immer stabil bleibt und nicht umkippen kann, wenn sich der Säugling darin befindet.
	Heben Sie das Produkt nicht vom Boden hoch, wenn sich der Säugling darin befindet.
	Lassen Sie den Säugling nicht im Produkt schlafen. Das Schlafen in Bauchlage kann ein Erstickungsrisiko darstellen und erhöht vermutlich das Risiko des plötzlichen Kindstods (SIDS). Bezug: NHS-Leitlinien und US-Kampagne Safe to Sleep®.

	Die Daytot Aktivitätsmatte kann verwendet werden, um eine saubere und gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Alternative Matten wurden nicht getestet und werden für die Verwendung mit diesem Produkt nicht empfohlen.
	Es sollten keine anderen Geräte oder Produkte in Verbindung mit Joey verwendet werden.
	Achten Sie darauf, dass die Hände / Finger / Füße und Zehen des Säuglings stets von der Unterseite des Produkts ferngehalten werden, um Verletzungen zu vermeiden.
	Beachten Sie die wichtigsten Positionierungsanforderungen für die Größenbestimmung und vergewissern Sie sich, dass die richtige Konfiguration für das Säugling verwendet wird. Siehe Abschnitt 10 „Gebrauchsanweisung“.
	Die Bezüge von Joey enthalten Latex.

### Reinigung und Lagerung

	Entfernen Sie die Räder nicht vom Produkt.
	Außerhalb der Reichweite von Säuglingen aufbewahren.
	Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder bei extremen Temperaturen.

### Entsorgung

	Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die Hinweise der örtlichen Abfallentsorgungseinrichtung. Die Einzelteile können getrennt werden, um das Recycling zu erleichtern, sofern möglich.
---	--

## ABSCHNITT 4: Garantiebedingungen

Die Produkte können bis zu 12 Monate nach dem Kauf zur Reparatur oder zum Austausch an Daytot zurückgeschickt werden. In jedem Fall liegt es in der Verantwortung des Kunden, zu gewährleisten, dass die zurückgesendeten Waren angemessen verpackt sind, vorzugsweise in der Originalverpackung.

Bitte kontaktieren Sie den Daytot Kundendienst, um uns zu benachrichtigen und eine Fallnummer zu erhalten, bevor Sie Ihr Produkt zurückschicken.

Der Kunde ist für die Kosten der Rücksendung der Waren verantwortlich. Nach der Rücksendung reparieren oder ersetzen wir Ihre Ware und senden sie innerhalb von 14 Tagen kostenlos an Sie zurück.

## ABSCHNITT 5: Sicherheitsinformationen

Mitteilung an den Nutzer und/oder Betreiber: Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden in dem der Anwender und/oder Betreiber niedergelassen ist.

### Allgemein

- Der Daytot Joey entspricht der Entflammbarkeitsprüfung EN1021 Teil 1 & 2. Das Produkt sollte jedoch von offenen Flammen und allen Zündquellen ferngehalten werden.

### Das Zusammenbauen

- Nehmen Sie keine Änderungen vor und bauen Sie keine anderen als die mitgelieferten Komponenten ein. Ersatzteile sind unter folgender Adresse erhältlich: hi@daytotjourneys.com.

### Einsatzbereit machen

- Achten Sie darauf, dass zwischen den Schultergurten und dem Hals des Säuglings ein kleiner Abstand gelassen wird.
- Halten Sie die Klettverschlüsse und ungepolsterten Beschlagflächen vom Säugling fern, da sie leichte Verletzungen verursachen könnten.

### Einsatz

- Wenn der Säugling irgendeine Form von Stress zeigt, die von der üblichen Form abweicht, nehmen Sie ihn so schnell und so sicher wie möglich aus dem Produkt heraus. Der Säugling benötigt möglicherweise Zeit, um sich an das Produkt zu gewöhnen.
- Bei Hautreizungen oder unerwünschten Reaktionen nehmen Sie den Säugling heraus und informieren den Daytot Kundendienst.

- Achten Sie darauf, dass der Gurt während der Benutzung stets gut befestigt ist. Wenn sich der Gurt lockert, beenden Sie das Training und positionieren und sichern den Säugling erneut.
- Achten Sie stets darauf, dass der Säugling seinen Kopf während der Benutzung immer frei bewegen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Räder während der Benutzung Kontakt mit dem Boden haben. Die beiden äußeren Stabilisierungsräder können sich während der Benutzung kurzzeitig anheben. Wenn Sie Zweifel an der Stabilität des Säuglings oder des Produkts haben, stellen Sie den Gebrauch ein und wenden Sie sich an den Daytot Kundendienst.

### Reinigung und Lagerung

- Achten Sie auf die regelmäßige Reinigung aller Teile gemäß Abschnitt 7 „Reinigung und Pflege“. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu beschleunigtem Verschleiß / Fehlfunktion des Produkts oder unerwünschter Bakterienbildung führen.
- Achten Sie stets darauf, dass das Produkt vor dem Gebrauch vollständig gereinigt wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem geeigneten Ort, um Stolper- und Sturzgefahren zu vermeiden, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Säuglingen auf.

## ABSCHNITT 6: Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

Joey kann ab einem Schwangerschaftsalter von 37 Wochen (volle Laufzeit) verwendet werden. Joey kann zu Hause, im Krankenhaus, in der Frühförderung oder im klinischen Umfeld eingesetzt werden.

### Vorsichtsmaßnahmen

- wie Skoliose oder Kyphose
- Starker Hochtonus (sehr angespannte Muskeln)
- Schwere Muskelkontrakturen
- Schwere muskuläre oder skelettale Asymmetrie einschließlich Hüftluxation
- Progressive Erkrankungen und solche, die mit Muskelschwund einhergehen
- Hohes Risiko für Knochenbrüche oder kürzlich aufgetretene Brüche
- Starke, unkontrollierte Bewegungsmuster
- Unzureichend kontrollierte Krampfanfälle
- Säuglinge, die auf die Verwendung einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) angewiesen sind
- Medizinische Instabilität einschließlich eingeschränkter Atem- oder Herz-Kreislauf-Funktion
- Abhängigkeit von lebenserhaltenden Geräten wie Sauerstoffflaschen durch Dritte.

### Kontraindikationen

Kontraindikationen im Zusammenhang mit der Anwendung von Joey. Alle Vorsichtsmaßnahmen liegen im Ermessen des verordnenden Arztes oder der Eltern.

Daytot empfiehlt, dass ein geschulter und erfahrener Therapeut bei der Erstbeurteilung, Einrichtung und Wiederausgabe des Produkts anwesend ist, um das Risiko zu minimieren.

Die Therapeuten sollten sich an der Liste der Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen orientieren.

Wenn der verordnende Therapeut der Meinung ist, dass ein Säugling geeignet ist, bitten wir ihn, eine Risikobewertung vorzunehmen und auf der Grundlage seiner klinischen Erfahrung vorzugehen.

## ABSCHNITT 7: Reinigung und Pflege

- Es wird empfohlen, das Produkt gelegentlich, täglich und wöchentlich zu reinigen.
- Zerlegen Sie das Produkt in seine Einzelteile und befolgen Sie die spezielle Anleitung für jedes Teil.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel zur Reinigung des Geräts oder seiner Teile.

- Setzen Sie das Gerät keiner unnötigen Belastung aus, indem Sie es unter anderen Geräten aufbewahren.
- Lagern Sie es an einem geeigneten Ort, um Stolper- oder Sturzgefahren zu vermeiden.

### Rahmenteile

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder -geräte.
- Bei Bedarf zerlegen Sie die Kunststoffteile und reinigen sie mit warmem Wasser, antibakterieller Seife und einem sauberen, trockenen Tuch.
- Versuchen Sie nicht, die Räder zum Reinigen auszubauen.
- Reinigen Sie bei Bedarf die bewegliche Oberfläche der Räder mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig warmes Wasser, um das Tuch zu befeuchten. Achten Sie darauf, dass alle Räder frei beweglich sind und nicht durch Schmutz oder Ablagerungen behindert werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht vollständig in Wasser ein.
- Achten Sie darauf, dass alle Beschlagteile vollständig trocken sind, bevor Sie das Produkt wieder zusammenbauen bzw. verwenden.

### Polster

- Teile nicht in den Trockner legen und nicht bügeln.

- Fangen Sie Flecken so schnell wie möglich mit einem saugfähigen Tuch, Handtuch oder Schwamm auf. Das Reinigen mit einem Schwamm, warmem Wasser und Seife ist bei normalen Verschmutzungen und kleineren Flecken ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Stoff nicht zu nass wird, damit sich der Fleck nicht ausbreitet.
- Die Polsterbezüge können bei 40 Grad in der Maschine gewaschen werden.
- Die Lätzchen können bei 40 Grad in der Maschine gewaschen werden.
- Damit der Klettverschluss intakt bleibt, entfernen Sie regelmäßig alle Fusseln mit einer trockenen Zahnbürste, Katzen-/Hundedrahtbürste oder einer Klebe-Fusselrolle.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Polsterelemente einschließlich Schaumstoffteile vor dem Zusammensetzen vollständig trocken sind.

### Kissen

- Verwenden Sie bei Bedarf ein Tuch mit etwas warmem Wasser und antibakterieller Haushaltsseife, um den Schaumstoff zu reinigen. Achten Sie darauf, dass das Kissen vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.
- Nicht in der Maschine waschen oder in den Trockner legen.

### Aktivitätsmatte

- Mit warmer Seifenlauge abwischen oder einem Haushaltsdesinfektionsmittel desinfizieren. Kein Bleichmittel verwenden. Vor dem ersten Gebrauch waschen.

## ABSCHNITT 8: Tägliche Überprüfung

Die folgenden Hinweise sollten vor jeder Sitzung beachtet werden. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit des Produkts haben, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an den Daytot Kundendienst unter [hi@daytotjourneys.com](mailto:hi@daytotjourneys.com).

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kunststoffteile intakt sind. Prüfen Sie sie auf große Absplitterungen oder Risse.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Polsterteile intakt sind. Prüfen Sie sie auf Risse, lose Nähte, übermäßige Verschmutzung und darauf, dass die elastischen Teile einwandfrei sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Stabilisator und Halteknopf sicher befestigt sind. Wenn sich die Schraubengewinde überkreuzen, wenden Sie sich bitte an den Daytot Kundendienst.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Räder in alle Richtungen frei beweglich und die beweglichen Flächen frei von größeren Spänen oder Dellen sind.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Räder den Boden berühren, wenn sie auf einer ebenen Fläche stehen, mit Ausnahme des zentralen Stabilisierungsgrads (1 mm Abstand).
- Überprüfen Sie, ob die Polster und Bezüge korrekt an den Kunststoffteilen angebracht sind. Sollten sie beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Daytot Kundendienst.
- Überprüfen Sie, ob die Lätzchen einwandfrei sind und sauber sitzen, damit sich im Kopfbereich keine Falten ansammeln. Andernfalls könnten die Atemwege blockiert werden.
- Achten Sie auf die wichtigsten Positionierungsanforderungen für die Größenbestimmung und sorgen Sie dafür, dass die richtige Konfiguration für Ihr Kind verwendet wird.

## ABSCHNITT 9: Die Wiederausgabe von Daytot Produkten

Joey ist für den Wiedereinsatz bei weiteren Nutzern geeignet.

Joey hat eine definierte Produktlebensdauer von 3 Jahren.

Bevor ein Daytot Produkt wieder ausgegeben wird, empfehlen wir, es nach dem folgenden Verfahren zu desinfizieren:

- **Hinweis: Reinigen Sie das Produkt immer zuerst, um angesammelte Verschmutzungen zu entfernen, bevor Sie es desinfizieren/hygienisch rein machen.**
- Alle Beschlagoberflächen sollten mit Desinfektionstüchern oder flüssigem Desinfektionsmittel auf einem weichen Tuch abgewischt werden. Geeignete Produkte sind 70%iger IPA, 70%iger Alkohol oder ein antibakterielles Waschmittel und warmes Wasser. Die Anweisungen des Herstellers für das gewählte Produkt sollten befolgt werden. Polstermöbel und Stoffe sollten gemäß Abschnitt 7 „Reinigung und Pflege“ gründlich gereinigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass dem Produkt ein Exemplar des Benutzerhandbuch beigelegt ist. Sollten Sie Zweifel an der sicheren Verwendung Ihres Daytot Produkts haben oder sollten Teile ausfallen, stellen Sie bitte die Verwendung des Produkts ein und wenden sich an den Daytot Kundendienst.


## ABSCHNITT 10: Gebrauchsanweisung

### 10.1: Das Auspacken und Zusammenbauen von Joey

Achten Sie darauf, den Karton nicht aufzuschneiden, da Sie einige der darin befindlichen Teile beschädigen könnten. Die Teile sind in Polyäthylenbeuteln verpackt. Nehmen Sie sie vorsichtig aus dem Karton und überprüfen Sie, ob Sie alle benötigten Teile haben.

#### Enthalten:


- A. Gehäuse
- B. Stabilisator inkl. Schraubenkopf
- C. Bezugspaket
- D. Kissen
- E. Lätzchenset (x3)
- F. Gebrauchsanweisung

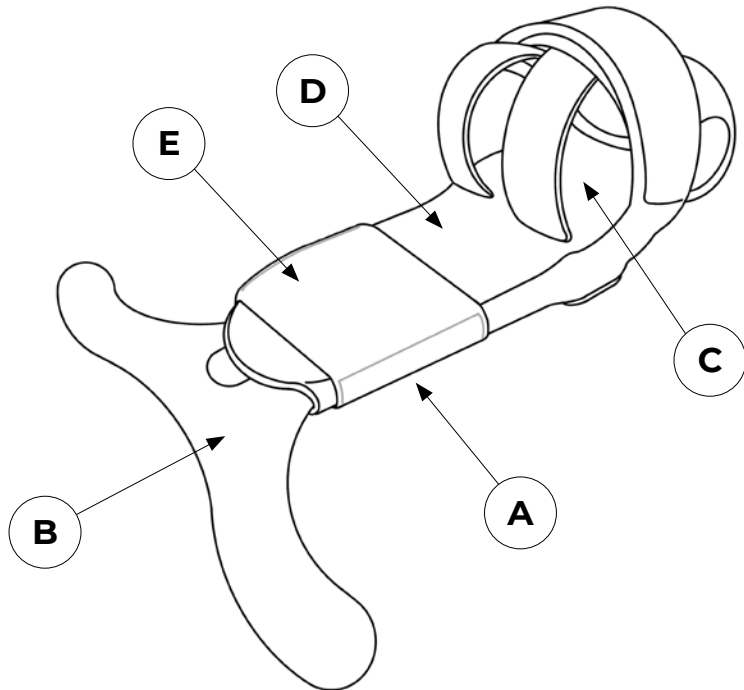


### 10.2: Das Anbringen des Stabilisators

10.2.1 Setzen Sie das Gehäuse auf den Stabilisator.

10.2.2 Befestigen Sie die beiden Teile miteinander, indem Sie den Schraubenknopf von Hand anziehen.

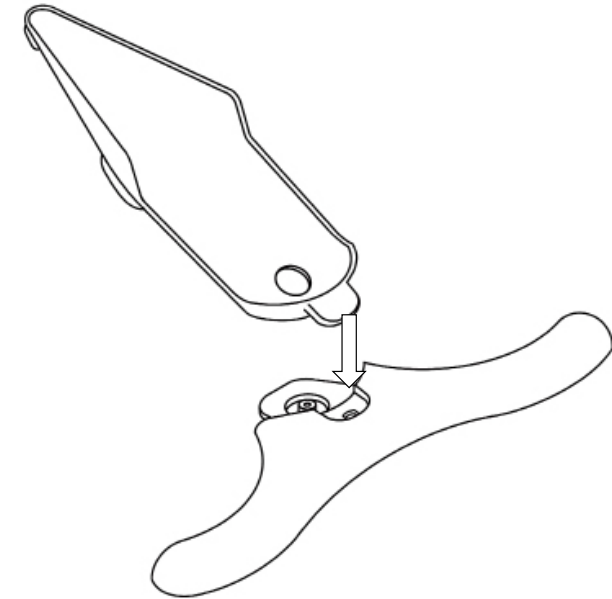


10.2.1

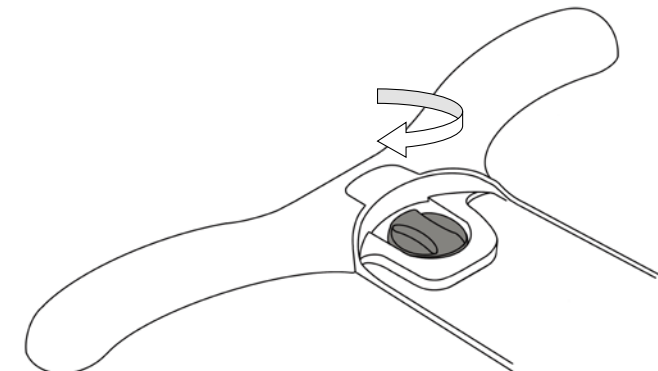

10.2.2

**10.3: Das Einsetzen des Kissens**

- 10.3.1 Größe 1 – Schieben Sie das Kissen unter die Laschen an der Ober- und Unterseite des Bezuges.
- 10.3.2 Größe 2 – Schieben Sie das Kissen unter die Laschen an der Ober- und Unterseite des Bezuges und in die beiden mittleren Gurte (!).

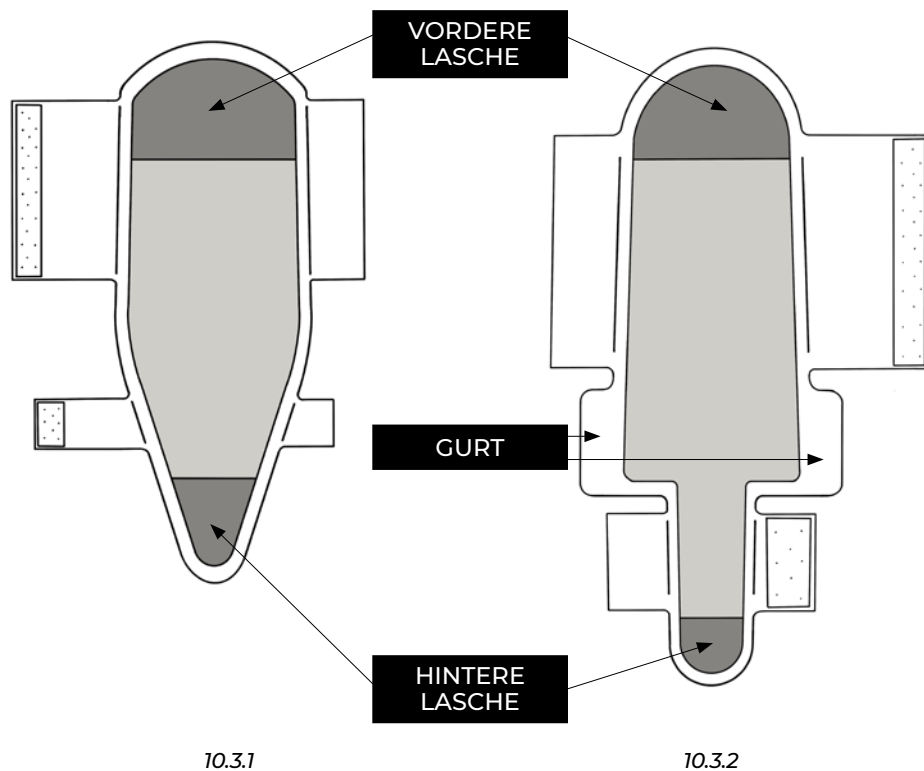


10.3.1

10.3.2

**10.4: Das Einstellen des Einsatzes Nur \*Größe 2**

- 10.4.1 Joey wird in Größe 2 wird mit einem Einsatz geliefert, der verwendet werden kann, um das Becken des Kindes vom Boden abzuheben. Das wird mit zunehmendem Alter des Kindes erforderlich sein.


Der Einsatz besteht aus zwei Seiten: **A** und **B**.

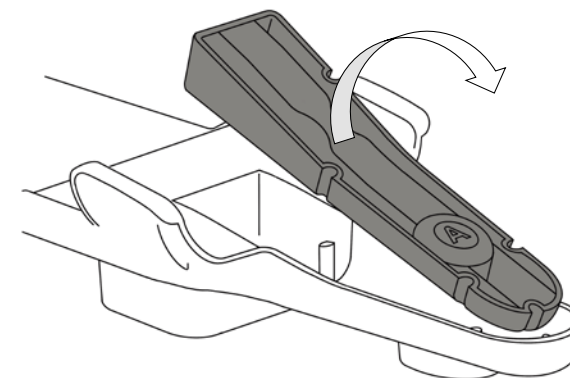

10.4.1

**Seite A** sollte in erster Linie beim Übergang von Größe 1 zu Größe 2 verwendet werden. Diese Einstellung ist für Säuglinge im Alter von ca. 2-4 Monaten geeignet. Sie hält das Becken tief am Boden, so dass die Füße des Säuglings den Boden berühren können.

- 10.4.2 **Seite A** – Der Einsatz sollte bündig im Produkt sitzen. Der Buchstabe "A" zeigt nach oben.

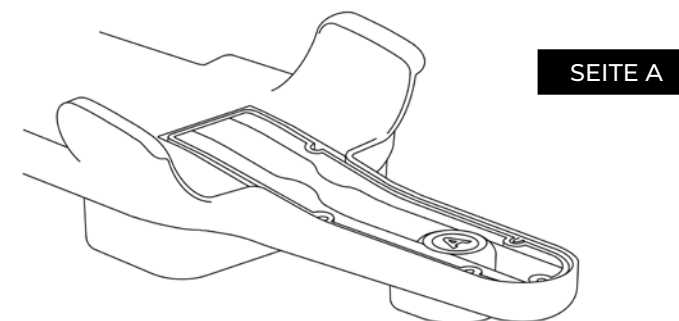


10.4.2




**Seite B** sollte im Alter von ca. 4 Monaten eingeführt werden. Sie sollten zu Seite B übergehen, wenn die Knie des Säuglings den Boden berühren, wodurch wiederum eine vollständige Beugung und Streckung der Beine und/oder Knie (Krabbelbewegung) verhindert wird.

**10.4.3 Seite B** – Drehen Sie den Einsatz einfach um und legen Sie ihn wieder in das Produkt, wie unten gezeigt. Der Buchstabe „B“ zeigt nach oben. Dadurch wird das Becken des Säuglings um 15 mm angehoben.

**10.4.4** Wenn Sie den Einsatz auf Seite B verwenden, sollten Sie auch den Druckknopf an der Unterseite des Gurtes mit dem Druckknopf an der Rückseite des Bezuges verbinden.

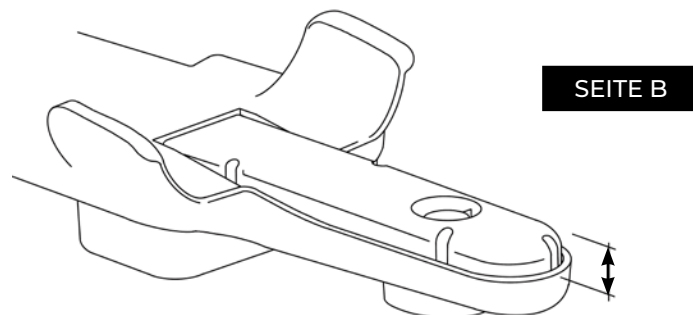

10.4.3

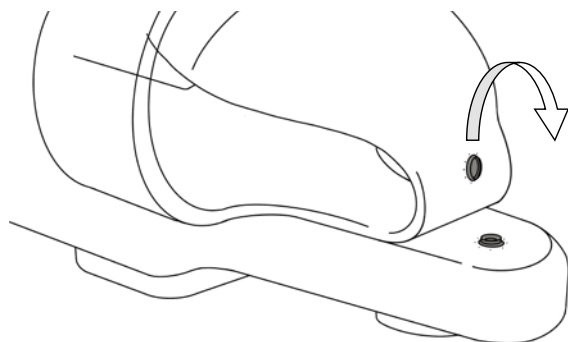

10.4.4


Wenn Sie Fragen in Bezug auf den Einsatz haben, schlagen Sie bitte die Größentabelle auf unserer Website nach, konsultieren den Therapeuten des Säuglings oder wenden sich an den Daytot Kundendienst.

## 10.5: Das Anbringen der Bezüge


### Bezug in Größe 1:

**10.5.1** Ziehen Sie den Bezug (mit dem bereits eingelegten Kissen) über die Rückseite des Produkts wie unten gezeigt.

**10.5.2** Befestigen Sie den Klettverschluss an der Vorder- und Rückseite des Produkts wie abgebildet. Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss gerade und flach und die Unterseite des Produkts sauber und ordentlich ist. Dadurch wird verhindert, dass der Bezug den Boden berührt.

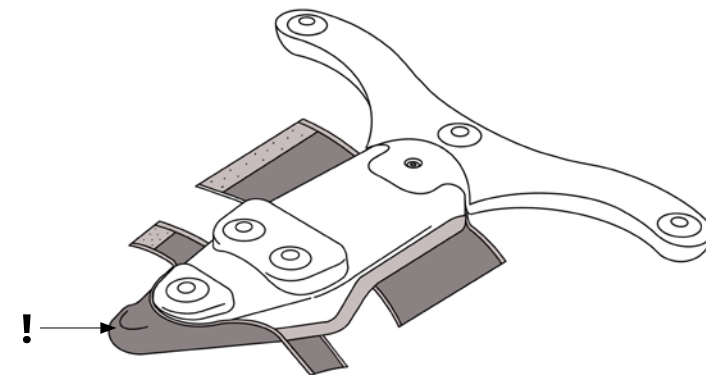

10.5.2

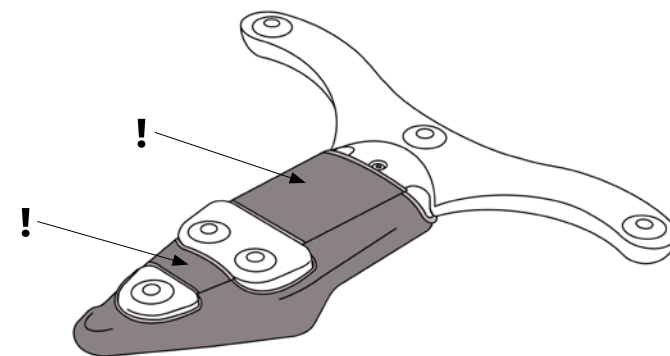


10.5.2


**Bezug in Größe 2:**

10.5.3 Ziehen Sie den Bezug (mit dem bereits eingelegten Kissen) über die Rückseite des Produkts wie unten gezeigt. Streifen Sie dann die mittleren Gurte des Bezuges auf jeder Seite über das Produkt **(!x2)**. So lässt sich der Klettverschluss leichter befestigen.

10.5.4 Befestigen Sie den Klettverschluss an der Vorder- und Rückseite des Produkts wie abgebildet. Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss gerade und flach ist und die Unterseite von Joey sauber und ordentlich ist. Dadurch wird verhindert, dass der Bezug den Boden berührt.

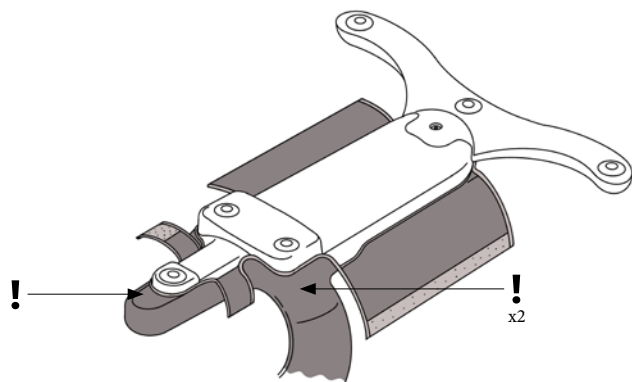

10.5.3

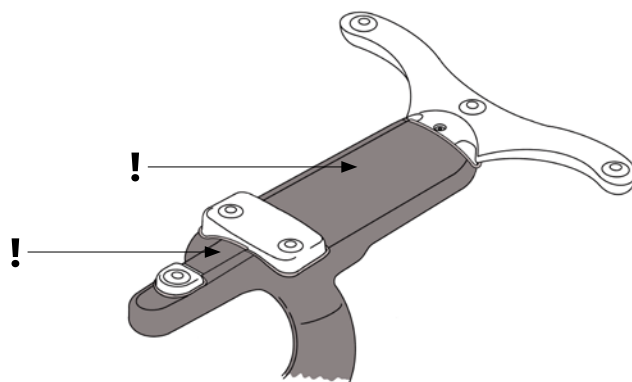


10.5.4


**10.6 Das Anbringen des Lätzchens**

10.6.1 Legen Sie ein Lätzchen auf die Oberseite des Produkts, wo sich der Kopf des Säuglings befindet. Ziehen Sie das Lätzchen an beiden Seiten fest, so dass keine Falten entstehen, und befestigen Sie es, indem Sie es an beiden Seiten fest andrücken.

10.6.2 Vergewissern Sie sich, dass das Lätzchen glatt und fest sitzt und keine Falten bildet, die die Atemwege des Säuglings behindern könnten.

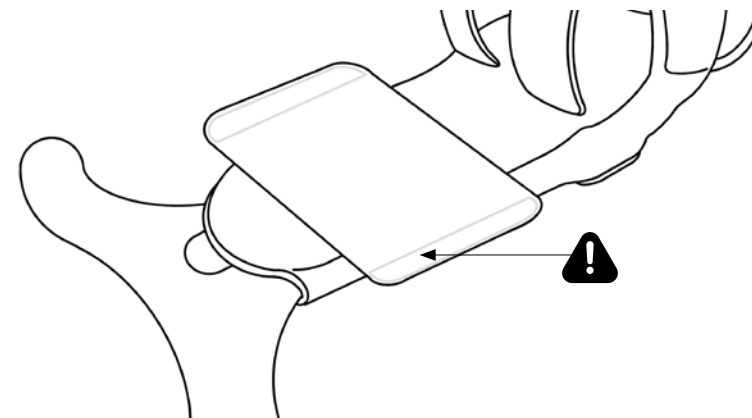

10.6.1

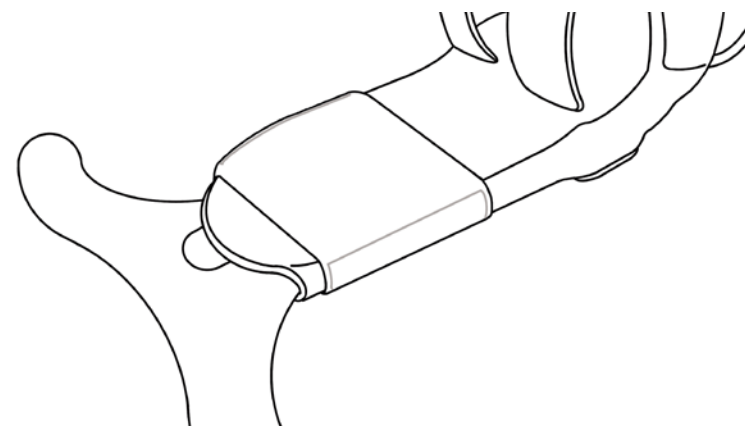

10.6.2

## 10.7: Vorbereitung und Einrichtung

Wir empfehlen, das Produkt vor dem Füttern des Säuglings zu verwenden. Oder warten Sie nach dem Füttern des Säuglings mindestens 30 Minuten, falls es zu einem Verdauungsreflux kommt. Der Säugling sollte sich in einem ruhigen und wachen Zustand befinden.

Wir empfehlen, dass der Säugling einen Body trägt, bei dem die Beine und Unterarme frei sind, damit er sich frei bewegen kann.


Der Säugling sollten barfuß sein, ohne Socken oder Schuhe. So kann er die Oberfläche greifen, wenn er dagegen stößt.

### Das Umsetzen des Säuglings in den Joey


- 10.7.1 Öffnen Sie den Hauptgurt, den mittleren Gurt und die Schultergurte und legen Sie sie wie gezeigt flach aus.
- 10.7.2 Der Erwachsene sollte sich hinter dem Produkt positionieren, um zu gewährleisten, dass der Säugling mittig ausgerichtet ist. Bringen Sie den Säugling in Bauchlage und stützen Sie dabei seinen Kopf und Bauch, während Sie ihn sanft auf das Produkt absenken. Der Säugling sollte mit dem Bauch nach unten und dem Gesicht zu einer Seite gelegt werden.
- Richten Sie die Schultern des Säuglings leicht über den Schultergurten aus (ca. 2,5 cm / 1")
- 10.7.3 Stützen Sie den Säugling mit einer Hand, während Sie ihn festhalten. Ziehen Sie den Gurt zwischen den Beinen nach oben auf den Rücken. Achten Sie darauf, dass die Beine des Säuglings frei beweglich sind und die Füße den Boden berühren können. Bei kleineren Säuglingen kann der obere Teil des Gurtes in sich selbst verstaut werden.
- 10.7.4 Legen Sie die Schultergurte jeweils diagonal über den Körper des Säuglings, so dass sie als Kreuz enden. Die Schultergurte sollten fest gegen den Schulterbereich des Kindes gezogen werden, so dass eine feste Oberfläche entsteht, gegen die es drücken kann.
- 10.7.5 Ziehen Sie den rechten Gurt fest über die Mitte des Rückens des Säuglings. Ziehen Sie dann den linken Gurt fest über die andere Seite und drücken Sie den Klettverschluss herunter. Achten Sie darauf, dass der mittlere Gurt gleichmäßig über die Mitte des Rückens des Säuglings gelegt wird.

**NB.** Das Kind sollte so positioniert werden, dass Kopf und Hals gebeugt sind, der Rumpf gut gesichert ist und die Arme und Beine frei beweglich sind. Der Gurt sollte eng anliegen.


Um die Stabilität und die korrekte Ausrichtung zu überprüfen, können Sie den Säugling leicht hin und her wiegen. Wenn er instabil wirkt, nehmen Sie ihn heraus und beginnen den Vorgang erneut.

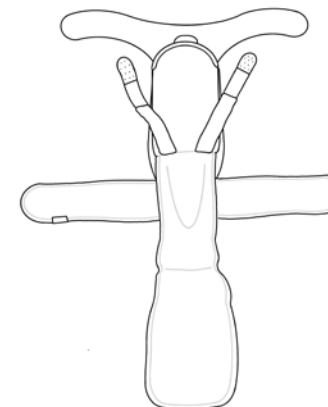


10.7.1

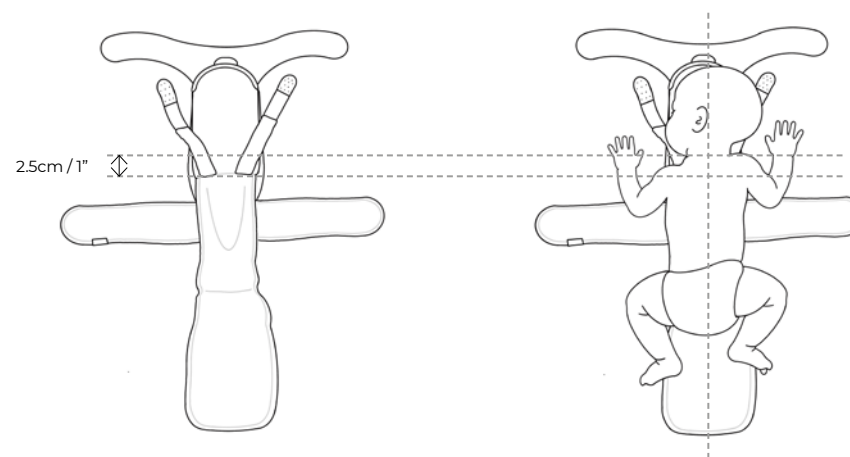


10.7.2

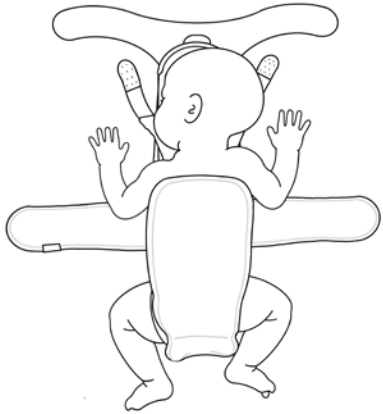


10.7.3

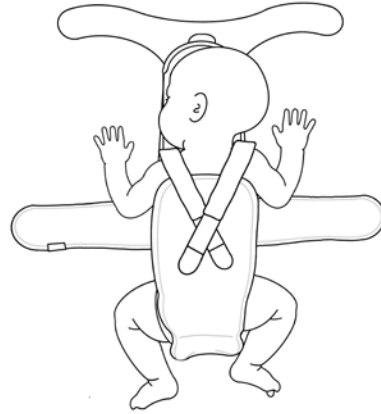

10.7.4

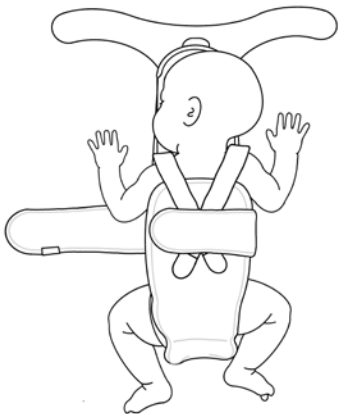

10.7.5

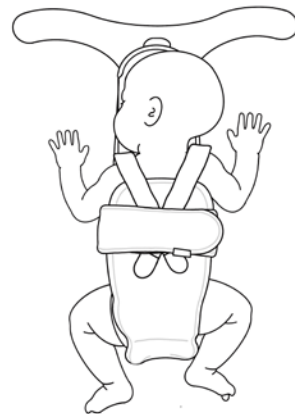

### 10.8: Die Verwendung von Joey

Sobald der Säugling sicher positioniert ist, geben Sie ihm etwas Zeit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen.

Zu Beginn kann der Erwachsene den Handrücken hinter die Fußsohlen des Kindes legen (waagrecht), um es beim Abstoßen zu unterstützen. Sie können auch die Handflächen des Kindes flach auflegen, wenn es einen Schritt nach vorne macht, damit das Gewicht über die Arme getragen werden kann.

Das Produkt ist so konzipiert, dass es die natürliche Entwicklung der wechselseitigen Krabbelbewegung (linkes Bein, rechter Arm oder rechtes Bein, linker Arm) fördert. Wir empfehlen Ihnen daher, abwechselnd die Hand hinter dem Kind zu halten, einen Fuß nach dem anderen, bis das Kind beginnt, diese Bewegung selbständig zu erlernen und auszuführen.

#### Während der Sitzung

Der Erwachsene kann am anderen Ende der Matte stehen, um das Kind zu ermutigen, sich vorwärts zu bewegen (bei Säuglingen, die den Kopf lieber drehen, sollte der Erwachsene abwechselnd auf der linken und rechten Seite stehen, um die Drehung des Kopfes zu fördern).

Sie können auch Spielzeug vorschlagen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu wecken und seine Vorwärtsbewegung zu fördern.

Achten Sie darauf, dass das Kind seinen Kopf während des Trainings bequem zur Seite drehen kann.

**NB:** Es ist normal, dass Säuglinge bei Bewegungen schreien, insbesondere wenn sie weniger als 2 Monate alt sind. Das liegt an der Anstrengung der Bewegung.

Wenn der Säugling Anzeichen von Müdigkeit oder echter Unruhe zeigt, sollten Sie ihn herausnehmen und es später erneut versuchen.

#### Trainingsdauer

Für die ersten Trainingseinheiten wird eine Dauer von 5 Minuten pro Tag empfohlen.

Bei guter Verträglichkeit kann das Training auf 10 Minuten pro Tag ausgedehnt werden (zweimal 5 Minuten). Ruhepausen werden empfohlen.

Bei einigen Säuglingen kann die Anwendung des Produkts über 6 Monate hinaus verlängert werden, je nach Behinderung, Zustand oder Wachstum. Sie können das Produkt so lange verwenden, bis das Kind aus dieser Größe herausgewachsen ist.

*Das erkennen Sie daran, wenn:*

- der Körper des Säuglings zu lang ist und der Kopf über den Stabilisierungsbereich hinausragt.
- wenn die Beine des Säuglings zu lang sind und seine Knie die Matte/den Boden berühren (das behindert die Bewegung).
- der Säugling beginnt, auf allen Vieren sein Gewicht zu tragen.
- der Säugling beginnt, selbständig zu krabbeln.

### 10.9: Das Zerlegen

Um das Produkt zu zerlegen, führen Sie die Schritte von 10.2 bis 10.6 in umgekehrter Reihenfolge aus.


### 10.10: Zusätzliches Zubehör

Neben dem zu Beginn von Abschnitt 10 aufgeführtem Zubehör können Sie auf der Daytot Website unter [www.daytotjourneys.com](http://www.daytotjourneys.com) folgendes Zubehör zusätzlich erwerben


- Lätzchen (3er-Pack)
- Daytot Aktivitätsmatte
- Ersatzstoffbezüge-Set
- Abwischbare Ersatzstoffbezüge-Set

## SEKTION 11: Technische Information

### 11.1: Produkt Größen

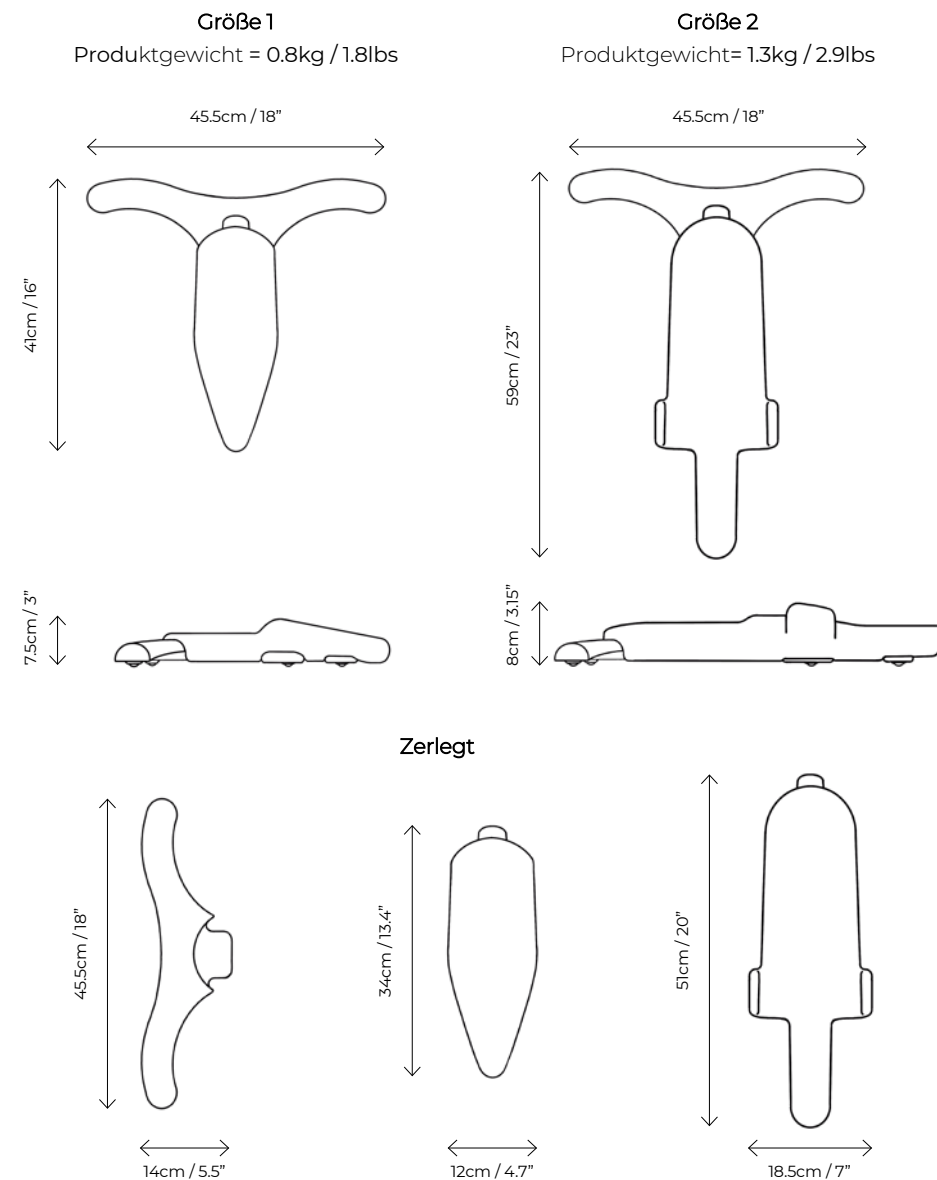

## 11.2: Die Größenbestimmung des Benutzers – Die wichtigsten Maße, die Sie nehmen müssen

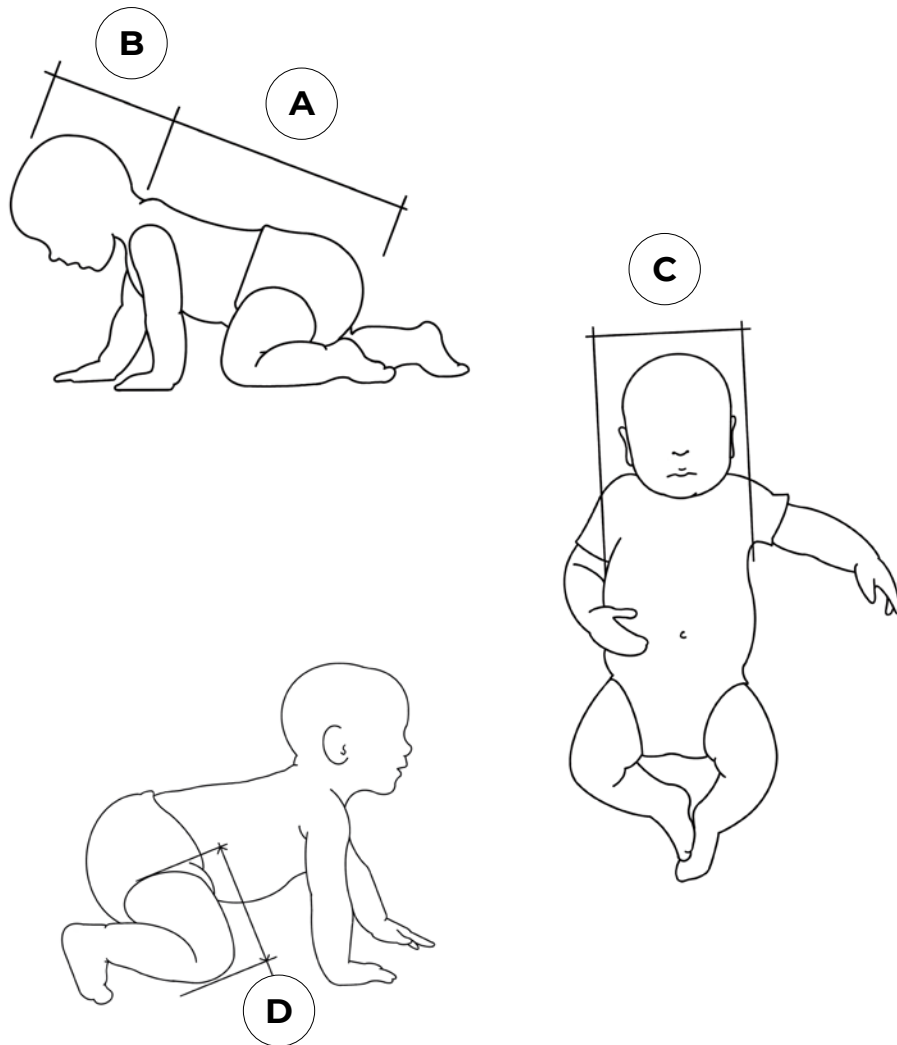

## 11.3: Joey Größen Tabelle

Dimension	Beschreibung	S1	S2-A	S2-B
<b>Alter</b>	Ca.	0-2 Monate	2-4 Monate	4-6 Monate
<b>Max. Benutzer-gewicht</b>		Max. 5 kg / 11 lbs	Max. 10 kg / 22 lbs	Max. 10 kg / 22 lbs
<b>A</b>	Schulter – Boden	Max 24cm / 9.4"	Max 27cm / 10.6"	Max 27cm / 10.6"
<b>B</b>	Kopfspitze – Schulter	Max 17cm / 6.7"	Max 23cm / 9.0"	Max 23cm / 9.0"
<b>C</b>	Brustweite	Min 11cm / 4.3"	Min 15cm / 5.9"	Min 15cm / 5.9"
<b>D</b>	Knie bis Leiste	Entfällt	Max 6cm / 2.4"	Min 6cm / 2.4"

## 11.4: Joey Materialien


















Joey besteht aus folgenden Materialien:

- Grundgehäuse: Kunststoff mit 3 Stück 360° Kunststoffrollen in Aluminium Gehäuse.
- Stabilisator: Kunststoff mit 3 Stück 360° Kunststoffrollen in Aluminium Gehäuse.
- Polsterung und Bezug: Microfaser bei 40° Waschbar.

Alle Bauteile bestehen aus korrosionsgeschützten Materialien.

Alle Bauteile sind beständig gegenüber haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln.

## ABSCHNITT 12: Symboltabelle

Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanleitung durchlesen
	CE-Kennzeichen
	Warnung
	Vorsicht
	Hersteller
	Produktcode
	Seriennummer
	Max. Auslastungsgewicht
	Herstellungsdatum
	Enthält Latex
	Unique Device Identification
	Maschinenwäsche – Wassertemperatur 60°C
	NICHT in den Trockner legen
	NICHT bügeln
	NICHT bleichen
	NICHT chemisch reinigen

## ABSCHNITT 13: Häufig gestellte Fragen

### Woher weiß ich, dass Joey für mein Kind geeignet ist?

Joey ist eine Frühinterventions-Krabbelvorrichtung für Säuglinge ab der 37. Schwangerschaftswoche bis zu einem Alter von ca. 6 Monaten.

Joey bietet ihnen die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln und sich unabhängig zu bewegen. In unserer Größentabelle finden Sie die empfohlenen Maße und Gewichte für den Benutzer.

### Gibt es Gründe, Joey nicht zu verwenden?

Wenn das Kind einen extremen Tonus aufweist oder vor kurzem operiert wurde (z. B. bei Wirbelsäulendefekten), empfehlen wir, dass Sie

Therapeuten und/oder Arzt zu konsultieren, bevor Sie Joey verwenden. Eine vollständige Liste aller Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in Abschnitt 6 des Benutzerhandbuchs.

### Wie oft am Tag sollte ich Joey anwenden?

Dies kann je nach Alter, Fähigkeiten, Stimmung und Tageszeit des Kindes variieren. Lassen Sie sich von Ihrem Kind leiten, aber vermeiden Sie es, es zu sehr zu ermüden. Das wirkt sich sonst auf seine Fähigkeiten bei anderen täglichen Aktivitäten

Es kann sein, dass der Säugling Joey gerne und häufig benutzt. In diesem Fall kann eine zweimal tägliche Anwendung von 5 Minuten angemessen sein. Wenn das Kind einen extremen Tonus oder sensorische Probleme hat, müssen Sie vielleicht langsamer vorgehen, um mit der Zeit eine Toleranz aufbauen zu können.

### Mein Kind hat einen extrem hohen/niedrigen Muskeltonus. Ist es geeignet?

Wenn der Säugling einen extremen Muskeltonus hat, kann es schwierig sein, Joey über die gesamte empfohlene Dauer der täglichen Anwendung zu verwenden. In diesem Fall kann Joey verwendet werden, um Kraft und Toleranz für diese Position aufzubauen, die mit der Zeit gesteigert werden kann. Wenn Sie Zweifel an der Eignung Ihres Kindes haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten.

### Mein Kind ist nicht in der Lage, den Boden mit den Füßen zu greifen. Was soll ich tun?

Wir empfehlen immer, Joey barfuß zu benutzen, da das dem Kind hilft, den Boden zu greifen. Wenn Ihr Boden zu rutschig ist, empfehlen wir Ihnen, die Daytot Aktivitätsmatte oder eine andere flache, glatte Oberfläche in Ihrer Wohnung zu verwenden, um zu sehen, ob das hilft.

### **Mein Kind bewegt seine Beine, aber seine Arme sind hinter ihm fixiert. Was soll ich tun?**

Wir möchten die wechselseitige Bewegung des natürlichen Krabbelns so weit wie möglich fördern. Wenn Sie mit einem Kind arbeiten, dessen Oberkörper wenig Kraft oder Tonus hat, können Sie es unterstützen, indem Sie bei jedem Schritt die Handflächen auflegen.

Versuchen Sie, mit dem Kind abwechselnd von hinten und von vorne zu arbeiten. Arbeiten Sie mit dem Kind daran, seine Arme an die Seite zu bringen und die Unterarme oder Handflächen flach auf den Boden zu legen.

### **Die Beine meines Kindes sind nach hinten gestreckt, als ob sie in der Luft „schwimmen“ würden. Wie kann ich es ermutigen, seine Beine zu beugen und zu strecken?**

Das deutet darauf hin, dass die Hüften des Kindes zu hoch sind, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass das Kind zu weit oben auf dem Produkt liegt oder dass die falsche Größe des Einsatzes verwendet wird.

#### *Befolgen Sie diese Schritte:*

1. Überprüfen Sie die Eignung anhand der Größentabelle.
2. Überprüfen Sie die Einstellung des Einsatzes. Überprüfen Sie die Einstellung des Einsatzes. Wenn Sie den Fortschritt von Größe 1 auf Größe 2 vollzogen haben, sollten Sie Einstellung A verwenden. Der Buchstabe „A“ sollte nach oben zeigen. Wenn Sie gerade Größe 2 gekauft haben, sollten Sie mit Einstellung A beginnen und den Abstand zwischen den gebeugten Knien des Säuglings überprüfen, um festzustellen, ob der Einsatz ausreichend hoch ist. In der Größentabelle finden Sie weitere Hinweise zu den Größenanforderungen des Einsatzes.
3. Versuchen Sie, den Säugling etwas weiter nach unten zu bewegen, damit die Füße des Kindes den Boden berühren können. Achten Sie darauf, dass die Schultern des Kindes nicht unter den oberen Teil der Schultergurte fallen, da dies zu Instabilitätsproblemen führen kann.

Wenn Sie weitere Ratschläge zur Größenbestimmung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Therapeuten des Kindes oder den Daytot Kundendienst.

### **Mein Kind sieht nicht stabil aus, was soll ich tun?**

Die beiden äußeren Stabilisierungsräder können sich während der Benutzung kurzzeitig anheben. Das ist normal. Es ist jedoch wichtig, dass das Kind sicher und bequem in dem Produkt liegt. Joey sollte nur in Innenräumen auf einer flachen, festen und ebenen Oberfläche verwendet werden.

Wenn Sie Zweifel an der Stabilität des Säuglings oder des Produkts haben, lesen Sie sich Abschnitt 10.7 „Vorbereitung und Aufbau“ durch, um zu gewährleisten, dass der Säugling korrekt im Produkt positioniert ist.

### **Wie oft sollte ich Joey reinigen?**

Wir empfehlen eine gelegentliche, tägliche oder wöchentliche Reinigung, damit Sie jetzt und in Zukunft den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Produkt ziehen können.

Achten Sie stets darauf, dass das Produkt vor der Verwendung durch andere Benutzer vollständig gereinigt wird. Hinweise dazu finden Sie in Abschnitt 7 „Reinigung und Pflege“ Ihres Benutzerhandbuchs.

### **Welche Fortschritte wird mein Kind mit Joey machen?**

Die Fortschritte mit Joey sind von Kind zu Kind unterschiedlich. Sie hängen von vielen Faktoren ab, z. B. von der Behinderung/ dem Zustand des Kindes, ob es irgendwelche zugrunde liegenden (oder damit zusammenhängenden) Gesundheitszustände gibt und wie häufig es Joey benutzt.

Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Therapeuten zu sprechen, um geeignete Ziele und Meilensteine für die Entwicklung Ihres Kindes festzulegen.



# daytot

## **Daytot Ltd**

97 Saintfield Road  
Belfast BT8 7HN  
Northern Ireland

**Tel: +44 (0) 289 013 9337**

**E-Mail: [hi@daytotjourneys.com](mailto:hi@daytotjourneys.com)**

USA Händler / Kanadischer Händler

## **Daytot Ltd**

97 Saintfield Road  
Belfast BT8 7HN  
Northern Ireland

**Tel: +44 (0) 289 013 9337**

**E-Mail: [hi@daytotjourneys.com](mailto:hi@daytotjourneys.com)**

Vorbereitungsdatum: Dezember 2022  
200-003 rev002

